



OTN
innovations
BADAL[®]

CE

OTNI 90 Toolbox

Werkzeuge zur Installation, Anpassung und Ersatz von Produkten von OTN Innovations und OTN Implants.

REF/Produktcode	Lieferant	Produktname	Menge
OTNI 16	OTN Innovations	OTNI 16 Puller	1x
OTNI 91	OTN Innovations	OTNI 91 Digital inclinometer holder	1x
OTNI 92	OTN Innovations	OTNI 92 DCA Retainer	1x
081.262A	Laserliner	Masterlevel Box Pro	1x
05075605001	Wera	2.5-25 nm Momentsleutel A6 Click-Torque 1/4" Inbus	1x
05022612001	Wera	inbussleutel 950 SPKL SW 6.0mm	1x
05023339001	Wera	HF 454 T-grip inbus 4.0 x 150mm	1x
05059610001	Wera	Inbus bits 4.0x50mm	1x
05059615001	Wera	Inbus bits 5.0x50mm	1x
05059620001	Wera	Inbus bits 6.0x50mm	1x
05059631001	Wera	Inbus bits 4.0x89mm	1x
8071	Bahco	8-serie – 27mm – 205mm	1x
3273660	Sharpie	Retractable Fine Point Black 1mm	1x
80103	Hoechstmass	Rollfix 150cm	1x

MD Medizinisches Gerät der Klasse I



OTN Innovations B.V.
Simon Stevinweg 48
6827BT Arnhem
Die Niederlande 

1. Unternehmen

OTN Innovations B.V.
Simon Stevinweg 48
6827 BT Arnhem
Gelderland, Die Niederlande

2. Produktbeschreibung

Die OTNI 90 Toolbox ist als Werkzeuglieferung zur Installation, Anpassung und zum Austausch von OTN Innovations und OTN Implants Produkten vorgesehen. Die OTNI 90 Toolbox besteht aus:

- OTNI 16 Puller
- OTNI 92 DCA Retainer
- OTNI 91 Digital inclinometer holder
- Laserliner Masterlevel Box Pro
- Wera HF 454 T-grip inbus 4.0 x 150mm
- Wera 2.5-25 nm Momentsleutel A6 Click-Torque 1/4" Inbus
- Wera inbussleutel 950 SPKL SW 6.0mm
- Wera inbus bits 4.0x50mm
- Wera inbus bits 5.0x50mm
- Wera inbus bits 6.0x50mm
- Wera inbus bits 4.0x89mm
- Bahco 8071 8-serie – 27mm – 205mm
- Sharpie Retractable Fine Point Black 1mm
- Hochstmass Rollfix 150mm

2. Sicherheit

2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Die OTNI 90 Toolbox ist als Werkzeuglieferung zur Installation, Anpassung und zum Austausch von OTN Innovations und OTN Implants Produkten vorgesehen. Einige der Produkte, die in der OTNI 90 Toolbox enthalten sind, haben eine individuelle vorgesehene Verwendung, wie in den jeweiligen beigefügten Gebrauchsanweisungen vermerkt ist.

2.2 Allgemeine Sicherheitshinweise

- Die Geräte dürfen nur gemäß ihrer bestimmungsgemäßen Verwendung eingesetzt werden.
- Einige der Geräte haben individuelle Sicherheitsvorschriften, wie in den jeweiligen Gebrauchsanweisungen vermerkt ist.
- Die Geräte dürfen nur von qualifiziertem Personal verwendet werden.

3. EU-Richtlinien und Entsorgung

Dieses Produkt entspricht allen erforderlichen Standards für die freie Bewegung von Waren innerhalb der EU.

Dieses Produkt darf nicht in allen Rechtsgebieten mit dem Hausmüll entsorgt werden. Befolgen Sie die Vorschriften zur Entsorgung im Land, in dem das Produkt verwendet wird. Bitte beachten Sie die Informationen, die von den zuständigen Behörden im Land der Verwendung bezüglich Rückgabe, Sammlung und Entsorgungsverfahren bereitgestellt werden.

4. Rechtliche Informationen

Alle rechtlichen Bestimmungen und Bedingungen unterliegen den jeweiligen nationalen Gesetzen des Landes der Verwendung und können entsprechend variieren.

4.1 Garantie

Die Garantie für die OTNI 90 Toolbox beträgt 24 Monate. Diese Garantie deckt Funktionsstörungen des Produkts aufgrund von Fehlern in Material, Produktion und Konstruktion ab, vorausgesetzt, dass die OTNI 90 Toolbox wie beabsichtigt und unter normalen Bedingungen verwendet wird. Normale Abnutzung ist von der Garantie ausgeschlossen. Abnutzung, die durch Funktionsstörungen der Produkte aufgrund von Materialfehlern, Produktion und Konstruktion verursacht wird, fällt ebenfalls unter die Garantie und wird nach Ermessen von OTN Innovations BV bestimmt.

Dieses Dokument ist auch verfügbar in:



Nederlands



English



Deutsch